

Le non-respect des conditions de prélèvement peut conduire à rendre des résultats erronés

Patient :

Nom d'usage :	Prénom du patient :
Nom de naissance :	Date de naissance :

Prescripteur / Préleveur :

Nom du prescripteur :	Nom du préleveur :
Date du prélèvement :	Heure du prélèvement :
Service :	

Renseignements cliniques / thérapeutiques :

Température :	
Antibiothérapie :	Nom de(s) l'antibiotique(s) :
Date de début du traitement :	
Suspicion d'endocardite ou de myocardite :	

Contenu du kit et prélèvement :

Les flacons pour hémoculture doivent être prélevés avant tout autres tubes.

1 flacon Bact/Alert FA Plus Aérobie à utiliser en 1 ^{er}	1 flacon Bact/Alert FN plus Anaérobie
1 unité de prélèvement sécurisé	1 cloche de raccordement

- Otez la capsule de protection des flacons d'hémoculture et désinfectez le bouchon en caoutchouc à l'alcool modifié. Laisser la compresse jusqu'au prélèvement.
- Se frictionner les mains avec une solution hydro-alcoolique.
- Faire un repère préalable sur les flacons correspondant au volume de prélèvement recommandé : 8 - 10 ml. Vérifier la date de péremption des flacons et leur intégrité.
- Réaliser une antiseptie rigoureuse du site de ponction dans l'ordre suivant : savon antiseptique et eau, eau stérile, séchage à la compresse stérile puis application de bétadine alcoolique avec respect du temps de séchage de 30 secondes.
- Retirez l'aiguille entourée de caoutchouc de l'épicrânienne et adapter l'épicrânienne sur la cloche.
- Prélevez jusqu'au trait de niveau effectué en 2.
- Identifier les flacons : nom d'usage, prénom, nom naissance, date de naissance, Température du patient, date et heure de prélèvement. En cas d'identification avec une étiquette collante il ne faut pas recouvrir même partiellement le code-barres du flacon.
- Noter les n° de séries sur les flacons. Ne pas coller l'étiquette sur le code-barres du flacon !!

<input type="checkbox"/> Ponction veineuse	<input type="checkbox"/> Sur cathéter
<input type="checkbox"/> Prélèvement unique	<input type="checkbox"/> Plusieurs séries sur 24h
Nombre de flacons prélevés :	<input type="checkbox"/> Série 1 <input type="checkbox"/> Série 2 <input type="checkbox"/> Série 3

Transport :

Acheminer le plus rapidement possible au laboratoire < 2 heures et max 24h. Laisser les flacons à T° ambiante.